

# ANIOS'CLEAN EXCEL D

Détergent  
pré-désinfectant  
de l'instrumentation

PRODUIT  
A DILUER  
25 ml > 5L




0,5%  
5 min.



## INDICATIONS


Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

## PROTOCOLE D'UTILISATION INSTRUMENTATION

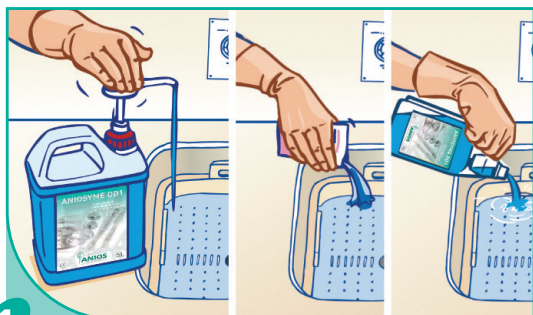

1

**Dilution à 0,5 % :** Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.

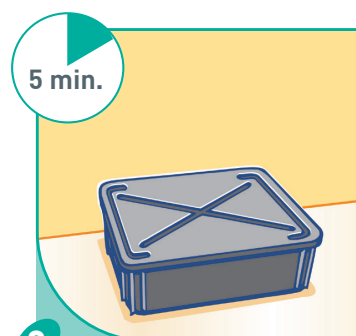

2

5 min.

Immerger complètement le dispositif médical.  
Temps de trempage : **5 minutes minimum.**  
Brosser, écouillonner si présence de souillures apparentes.



3

Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau de réseau (de bonne qualité pour microbiologique) éliminer toute trace de produit et souillure organique.

### ► Matériel thermosensible :

Passer à l'étape suivante  
(voir procédure interne à l'établissement)

### ► Matériel autoclavable :

Sécher soigneusement à l'aide d'un champ propre et passer à l'étape suivante  
(voir procédure interne à l'établissement)