

SURFANIOS Premium

Détergent désinfectant
sols et surfaces




PRODUIT
A DILUER
soit 20 ml → 8 L



INDICATIONS


Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...). Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

PROTOCOLE D'UTILISATION

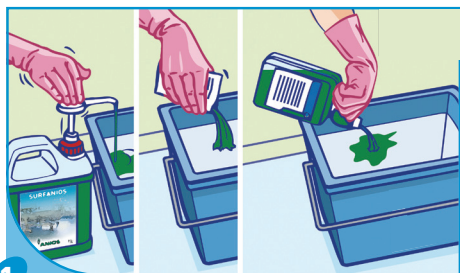

1

Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau.
Dilution à 0,25 % : verser une dose de 20 ml de SURFANIOS Premium dans le seau de lavage.

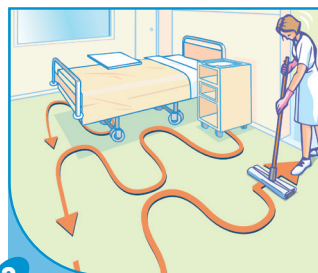

2

Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Le rinçage est inutile sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses.



3

Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet.



4

Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.

| Fréquence d'utilisation | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|--------------------------|-------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|
| SURFANIOS Premium | | | | | | | |

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.