



# SURFA'SAFE PREMIUM

## SPRAY DÉTERGENT DÉSINFECTANT DES SURFACES HAUTES

- Formulé sans substance CMR
- Sans parfum
- Sans alcool
- Séchage rapide et sans trace
- Large compatibilité avec les matériaux



### INDICATIONS

Détergent désinfectant destiné au traitement des surfaces et des équipements (plan de travail, paillasse, table d'examen...). Egalement destiné au nettoyage et à la désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale non immergeable et non invasive en clinique vétérinaire (stéthoscope, tensiomètres, lecteurs de glycémie...).

### COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

### DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- pH : 6 +/- 0.5

### DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

Produit biocide destiné à l'hygiène vétérinaire et à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1-TP2, TP3 et TP4) - usage réservé aux professionnels.



# SURFA'SAFE PREMIUM

## PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

### Activités à 20°C :

- Bactéricide en 3 min (EN 13727, EN 14561).
- Bactéricide en 2 min (EN 13697).
- Bactéricide en 15 min (EN 1656, EN 14349).
- Levuricide en 5 min et fongicide en 20 min (EN 13624, EN 14562).
- Levuricide en 5 min et fongicide en 20 min (EN 13697).
- Levuricide en 30 min (EN 1657, EN 16438).
- Actif sur Trichophyton en 30 min (EN 1657, EN 16438).

## MODE D'EMPLOI

S'utilise sans dilution.

1. Appliquer le produit directement sur la zone à traiter ou de préférence sur un non-tissé.
2. Bien répartir le produit (+/- 6 ml/m<sup>2</sup> soit environ 10 pulvérisations).  
Se reporter au tableau ci-après pour les conditions d'emploi.
3. Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

Pour les alliages et matériaux sensibles, il est recommandé de vérifier la compatibilité avec le produit.

| MATÉRIAUX ET SURFACES   | ACTIVITÉ RECHERCHÉE    | CONDITION D'EMPLOI à 20°C |
|---|------------------------|---------------------------|
| Sans contact avec les aliments pour animaux et pour l'hébergement et le transport | Bactéricidie           | 15 min                    |
|   | Levuricide             | 30 min                    |
|   | Fongicide              |                           |
|   | Actif sur Trichophyton | 30 min                    |
| Au contact des aliments pour animaux  | Bactéricidie           | 2 min                     |
|   | Levuricide             | 5 min                     |
|   | Fongicide              | 20 min                    |
| Instrumentation médico-chirurgicale non immergeable, non invasive                 | Bactéricidie           | 3 min                     |
|   | Levuricide             | 5 min                     |
|   | Fongicide              | 20 min                    |

Efficacité prouvée selon les normes européennes en vigueur pour le domaine vétérinaire. L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.  
Stocker entre +5°C et +35°C.

## CONDITIONNEMENT

12 flacons de 750ml avec distributeur de mousse diffuse ..... 2419.326HQ